

PRELEVEMENT A DEPOSER AVANT 9H30 AU LABORATOIRE

(sauf site du Neubourg)

TCA (dans le cadre d'un bilan pré-opératoire), **Facteur V** : stabilité de 6 heures
(Tube citraté - Bouchon **BLEU**)

**TCA et/ou ACTIVITE ANTI-Xa POUR LA SURVEILLANCE
D'UN TRAITEMENT PAR HEPARINE OU HBPM**

- 1) Stabilité de 6 heures sur tube **CTAD** (et uniquement de 2 heures sur Tube **CITRATE**)
- 2) Attention à respecter l'heure de prélèvement par rapport à l'heure d'injection

Nom du produit injecté	Horaire de prélèvement à respecter par rapport à l'horaire d'injection
CALCIPARINE	à mi-distance entre 2 injections (si administration SC)
FRAXIPARINE, FRAGMINE, LOVENOX, CLIVARINE	3 à 4 heures après l'injection
INNOHEP CLIVARINE	4 à 6 heures après l'injection

- 3) Veuillez indiquer sur la fiche de prélèvement le nom de l'héparine, l'heure de la dernière injection et l'heure du prélèvement.
- 4) Les tubes **CTAD** ne sont pas dans les coffrets de prélèvements mais sont à votre disposition sur simple demande (à conserver impérativement à l'abri de la lumière jusqu'au prélèvement)

EXAMENS BIOLOGIQUES AYANT UN COURT DELAI DE STABILITE

- **Ionogramme, Potassium, Phosphore** : doit être centrifugé par le laboratoire dans les 6 heures suivant le prélèvement
(Tube hépariné avec gel - Bouchon **VERT**)

**EXAMENS BIOLOGIQUES SPECIALISES A CONGELER DANS 4 LES HEURES
A RAPPORTER AU LABORATOIRE RAPIDEMENT APRES LE PRELEVEMENT**

(EXAMENS BIOLOGIQUES SPECIALISES LES PLUS FREQUENTS ENVOYES AU LABORATOIRE EUROFINS-BIOMNIS)

Aldostérone	Tube sec (Bouchon JAUNE)	Délai maximum de 4 heures entre le prélèvement et la congélation au laboratoire
Anticoagulant circulant, Antithrombine	Tube citraté (Bouchon BLEU)	
Calcitonine	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
CBG (transcortine)	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
Clozapine	Tube sec (Bouchon ROUGE)	
Chromogranine A	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
Cross-laps	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
Facteurs de la coagulation (sauf Facteur V)	Tube citraté (Bouchon BLEU)	
GH (hormone de croissance)	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
HCG chaîne β libre HCG dimère ($\alpha+\beta$) (Suivi cancérologie chez l'homme /ne concerne pas le test de grossesse β HCG)	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
HE4 (calcul ROMA)	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
HEPATITE B : ADN, charge virale de l'hépatite B	2 Tubes secs (Bouchon JAUNE)	

EXAMENS BIOLOGIQUES SPECIALISES A CONGELER DANS 4 LES HEURES

A RAPPORTER AU LABORATOIRE RAPIDEMENT APRES LE PRELEVEMENT

(EXAMENS BIOLOGIQUES SPECIALISES LES PLUS FREQUENTS ENVOYES AU LABORATOIRE EUROFINIS-BIOMNIS)

HEPATITE C : ARN, charge virale, génotypage	2 Tubes secs (Bouchon JAUNE)	<p>Cette liste est non exhaustive et donnée à titre indicatif : les conditions de conservation étant susceptibles d'être modifiées par le laboratoire spécialisé Eurofins-Biomnis, merci de consulter systématiquement le Manuel de Prélèvement dématérialisé du laboratoire, accessible sur internet: http://lbmboyer.manuelprelevement.fr/ login : IDE mot de passe : laboboyer</p> <p>ou nous contacter au 02 35 66 59 88</p>
IGF1 (somatomédine)	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
Inhibine B	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
Lamotrigine (LAMICTAL)	Tube sec (Bouchon ROUGE)	
Peptide C	Tube sec (Bouchon JAUNE) ou tube hépariné avec gel (Bouchon VERT)	
PCT (Procalcitonine)	Tube sec (Bouchon JAUNE) ou tube hépariné avec gel (Bouchon VERT)	
Protéine C, Protéine S	Tube citraté (Bouchon BLEU)	
Rénine active	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
Résistance à la protéine C activée	Tube citraté (Bouchon BLEU)	
Testostérone biodisponible ou libre	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
Thyroglobuline	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
TPA (antigène tissulaire polypeptidique)	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
VIH charge virale	Tube EDTA (Bouchon VIOLET)	
Vitamine B1 ou B6	Tube EDTA (Bouchon VIOLET) à l'abri de la lumière	

EXAMENS BIOLOGIQUES SENSIBLES PRESENTANT DES CONDITIONS PRE-ANALYTIQUES TRES PARTICULIERES

(EXAMENS BIOLOGIQUES SPECIALISES LES PLUS FREQUENTS ENVOYES AU LABORATOIRE EUROFINIS-BIOMNIS)



Prélèvement au laboratoire IMPERATIF

Acide lactique	Complément total CH50
ACTH	Sérotonine
Ammoniémie	Somatostatine
Calcium ionisé	Vitamine A
Catécholamines plasmatiques	Vitamine E
NSE	

La liste des prélèvements à réaliser impérativement au laboratoire n'est pas exhaustive: pour des analyses moins courantes, consulter le Manuel des prélèvements dématérialisé du laboratoire, accessible sur internet: <http://lbmboyer.manuelprelevement.fr/>
login : IDE
mot de passe : laboboyer
ou contacter le site où vous déposez vos coffrets ou au **02 35 66 59 88**